

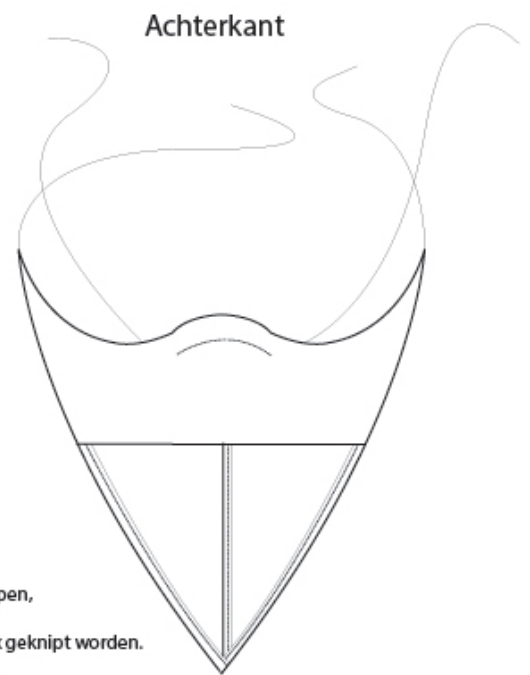
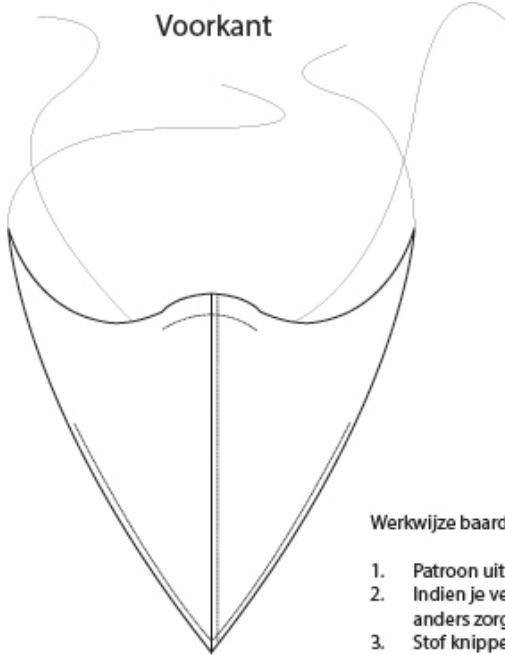


OPGELET: Printen op ware grootte (100%)

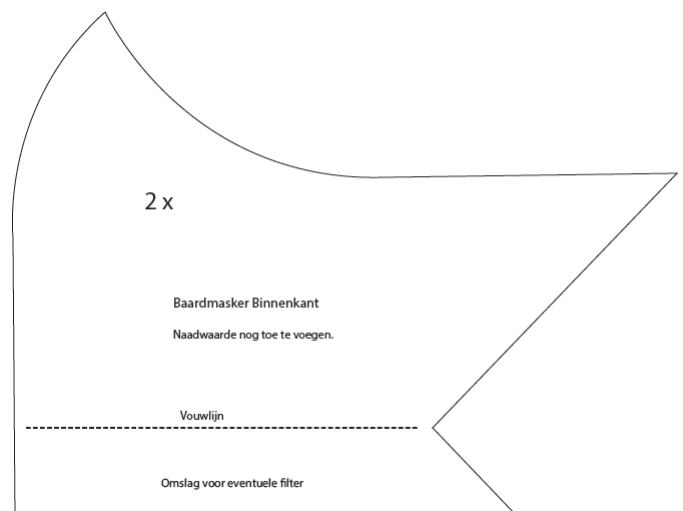


Werkwijze baardmasker

1. patroon uitknippen met zelf gekozen naadwaarde.
2. Indien je veters gebruikt, 2 veters van 90 cm in 2 knippen, anders zorg je voor 4 lintjes van elk 45 cm.
3. Stof knippen, Binnen- en Buitenkant moeten beide 2x geknipt worden.
4. De neus-naden van de Buitenkant aan elkaar stikken.
5. De neus-naden van de Binnenkant aan elkaar stikken.
6. Optioneel: de neus-naden "platstikken"
7. De Binnenkant op de vouw strijken, dit wordt de flap waar je een filter kan in plaatsen. Zorg dat je de flap naar de averechtse kant vouwt.
8. Stof overlocken.
(De "filterflap" van de Binnenkant kan je gevouwen mee overlocken)
9. De veters of lintjes op de juiste plaats tussen de 2 stoflagen plaatsen. Binnen-en Buitenkant met de goede kant op elkaar stikken.
10. De zoomnaad van de punt van de Buitenkant omstrijken en stikken.
11. Eventueel kan je een stikseltje aan de neus zetten waar je een ijzerdraadje kan doorsteken voor een betere pasvorm.

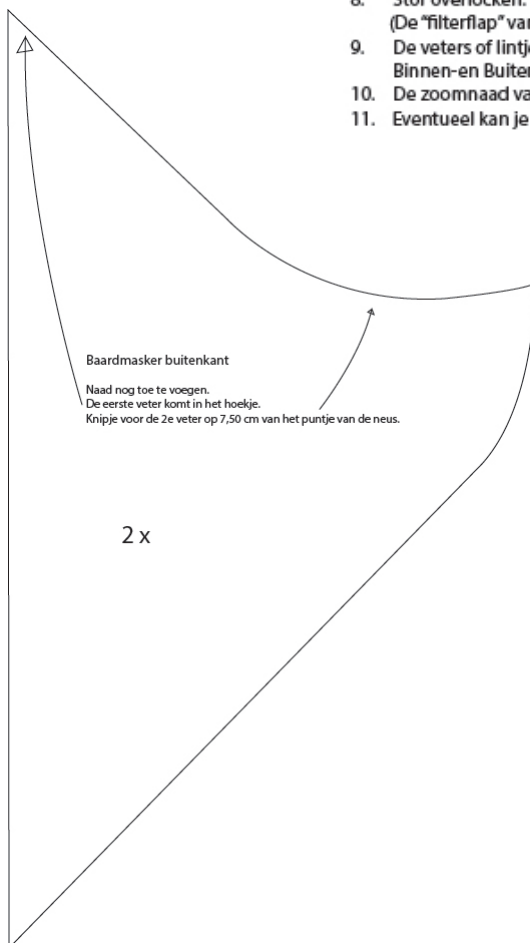

(ware grootte op de volgende bladzijden)

OPGELET: Printen op ware grootte (100%)

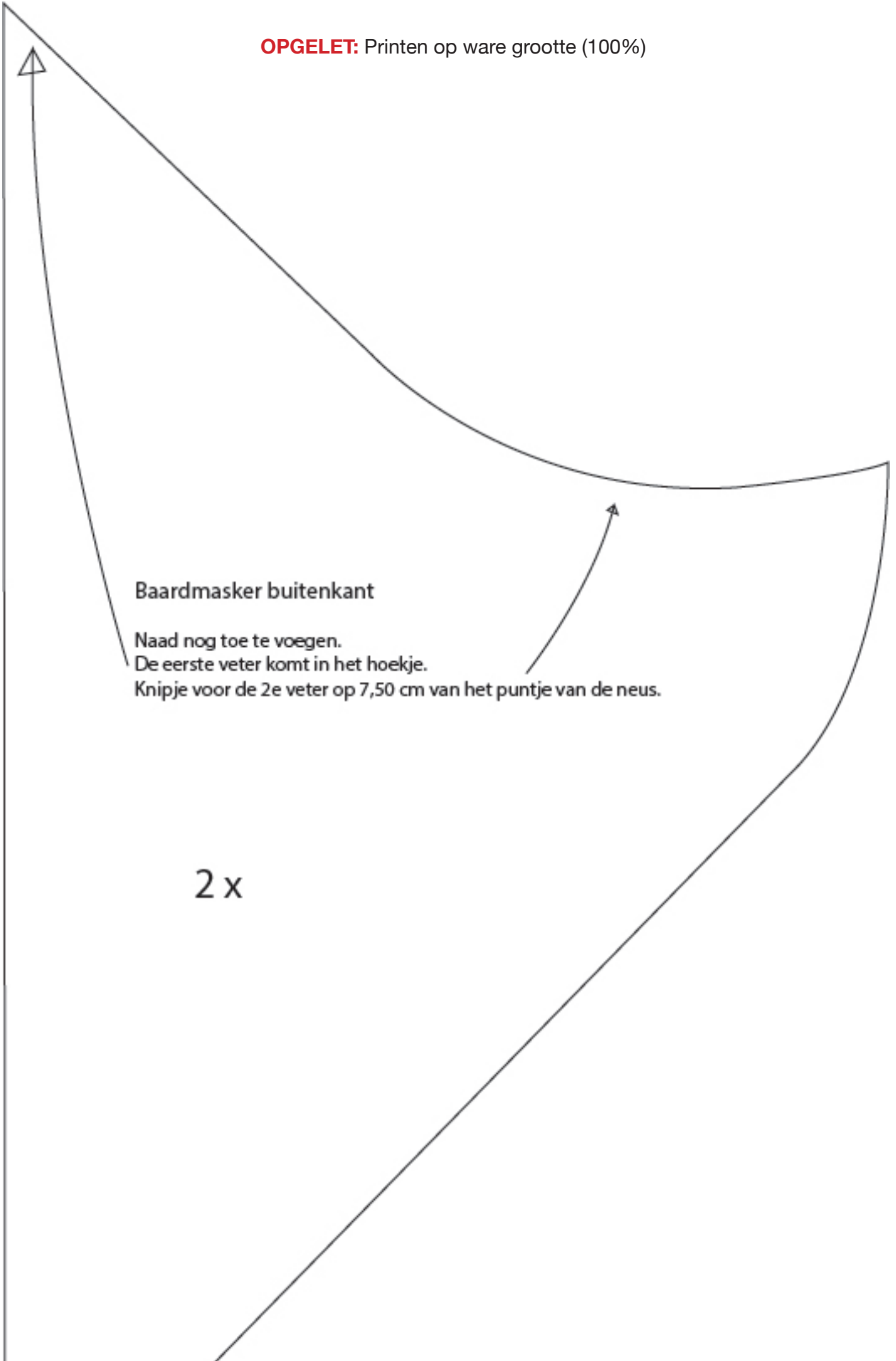

Baardmasker buitenkant

Naad nog toe te voegen.

De eerste veter komt in het hoekje.

Knipje voor de 2e veter op 7,50 cm van het puntje van de neus.

2 x

OPGELET: Printen op ware grootte (100%)

